



제조인증번호 : 제인 20-4707호



닥터벨트 에어핏

사용설명서

고객센터 : 1644-0565

이 제품은 '의료기기'이며 '사용상의 주의사항'과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오.

작성일자 : 2025. 03. 14

BUM-901-7(Rev.01)

제품 구성 및 각 부의 명칭

본체-앞면



- ① 좌/우측 벨트 : 에어셀과 자석이 허리에 밀착되도록 감싸는 부분
- ② 중앙 벨트 : 허리지지대와 에어셀, 도르래, 당김손잡이가 연결되는 벨트
※ 허리사이즈 : 약 23~30 사이즈(인치) 사용가능
- ③ 허리지지대 : 요추 전만 자세를 유지하도록 지지해 주는 기능
- ④ 도르래 : 영구자석과 에어셀을 허리에 밀착시켜주는 기능
- ⑤ 당김 손잡이 : 도르래를 당겨주는 손잡이
- ⑥ 공기입출구 : 펌프를 이용하여 에어셀에 공기를 주입 또는 배출 해주는 부분

구성품-펌프



공기주입구

에어셀에 공기를 주입해 주는 장치

제품 구성 및 각 부의 명칭

본체-뒷면



⑦ 에어셀 : 공기압을 이용해 허리를 견인해주는 기능

⑧ 자석 : 영구자석의 자계를 이용하는 부분으로 커버 내부에 위치함

구성품-연장벨트



본체에 연결하여 사용하는 연장벨트
※본체에 연결하여 사용시 허리사이즈
약 31~41 사이즈(인치) 사용가능

최초 출고 시 연장 벨트는 본체에 연결되어 있습니다.

사용 전 준비사항

- 1) 사용 전 반드시 사용설명서를 숙지하여 주십시오.
- 2) 제품에 파손 등이 없는지를 점검하고 파손이 있는 경우 사용하지 마십시오.
- 3) 영구자석에 이물질이 묻어 있는지 확인하여 주시고 이물질이 있는 경우 제거 후 사용하여 주십시오.


사용방법

본체만 사용 시 (23~30인치)



본체만 사용시 허리사이즈 **약 23~30인치** 사용

연장벨트 사용 시 (31~41인치)

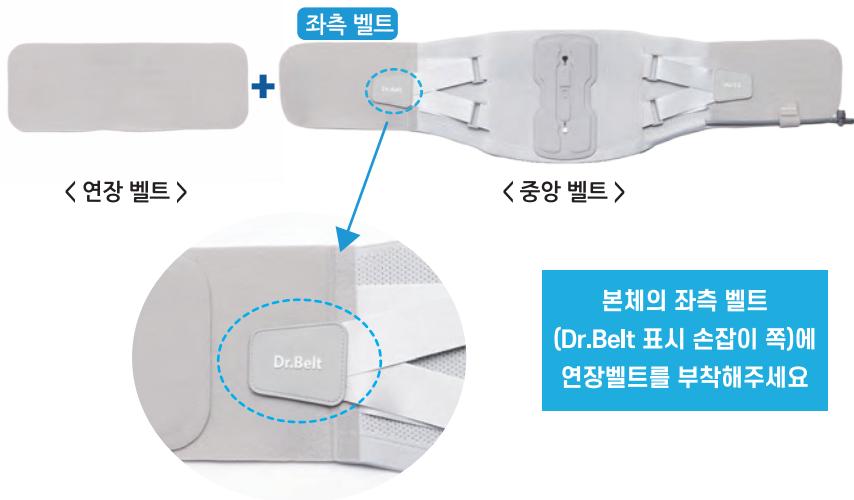

연장벨트 사용시 허리사이즈 **약 31~41인치** 사용

사용방법

조작방법



1) 피부에 직접 닿지 않도록 얇은 옷을 입으신 후 사용하십시오.



2) 허리지지대 부위가 허리 정중앙에 위치하도록 밀착시켜주십시오.



※ 본체 우측벨트(AirFit 손잡이)와 공기주입구가 사용자 오른쪽에 오도록 착용해주세요

사용방법

조작방법



3) 벨트를 몸에 밀착되도록 착용한 후 벨크로를 부착하여 고정시켜주십시오.



사용방법

조작방법



4) 당김 손잡이를 당겨 몸에 밀착되도록 조절한 후



당김 손잡이

5) 당김 손잡이를 벨트에 붙여 고정하여 주십시오.

사용방법

조작방법



6) 공기입출구에 펌프를 연결한 후 몸에 맞게 공기를 주입해 주세요.



사용방법

조작방법



7) 공기 주입이 끝나면 공기입출구에서 펌프를 분리하여 주십시오.



8) 사용 후에는 공기입출구 버튼을 눌러 공기를 배출하여 주십시오.

※ 공기주입으로 인하여 과도한 압박이 느껴질 경우 즉시 공기입출구 버튼을 눌러 공기주입량을 조절하여 주십시오.


사용방법

0

올바른 착용방법



공기입출구

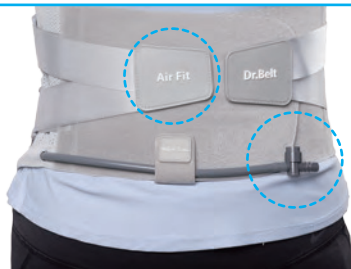

※ 본체 우측벨트(AirFit 손잡이)와
공기주입구가 사용자 오른쪽에
오도록 착용해주세요

※공기입출구가 오른쪽에 위치하도록 벨트를 착용해 주세요

X

잘못된 착용방법




사용방법

사용 후 보관방법



에어셀에 공기가 가득 차있는 경우 정확한 착용 효과를 볼 수 없습니다.

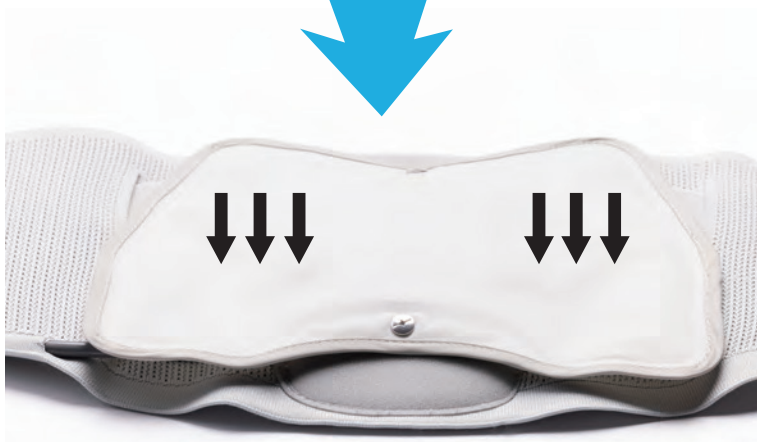

에어셀의 공기를 완전히 빼주신 후 보관하여 주시기 바랍니다.

사용방법

X



그림 1

- 1) 당김손잡이가 정 위치에 있지 않을 경우 착용 후 도르래 사용시 충분한 밀착력을 주지 못합니다.

O



그림 2

- 2) [그림1] 사진과 같은 상태일 경우, 당김손잡이를 [그림2] 사진처럼 도르래와 가깝게 위치시켜주세요.

사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 직사광선을 피하여 습기가 없는 건조한 장소에 보관하여 주십시오.
- 2) 기기에 날카로운 물건이 닿지 않도록 주의하십시오.
- 3) 무거운 물체로 압력을 가하지 마십시오.
- 4) 시계, 자기카드 등의 자기에 영향을 받는 것에는 가까이 하지 말아 주십시오.
- 5) 오랫동안 사용하지 않았을 경우에는 표면에 금속 등의 이물질이 흡입 부착되어 있지 않은지 확인하여 주십시오.
- 6) 본 제품은 세탁이 불가합니다. 오염 시 젖은 수건(물티슈)으로 닦아주시기 바랍니다.
- 7) 제품을 임의로 분해 및 개조하지 마시고 제품에 이상이 발견되면 즉시 사용을 멈추고 판매자에게 문의하십시오.

품질 보증

품질 보증서

제품명		제조번호	
구입일		구입처	
고객명		연락처	

품질 보증 기준

무상 보증 기간은 최초 구입일로부터 1년간 보장합니다.

구매일자를 증명할 수 없을 경우,
제품 및 포장케이스에 표시된 제조년월로부터 12개월 입니다.

- 1) 품질보증기간 내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자에 대해서는 당사가 무상으로 수리해 드리고, 수리가 불가능한 경우는 제품을 교환하여 드립니다.
- 2) 다음의 경우에는 무상보증기간 내라도 유상으로 수리해 드립니다.
 - 소비자의 부주의로 인하여 파손 되었거나 제품의 용도와 다르게 사용했을 시
 - 소비자의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 피해
 - 당사의 수리기술사가 아닌 다른 사람이 임의로 제품을 분해 또는 개조한 경우
 - 신나,벤젠 등 유기용제에 의하여 외관손상 및 변형된 경우
 - 이물질(세제,물,음료등)을 투입하여 고장이 발생한 경우
 - 천재지변에 의한 제품의 고장 또는 결함



**고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 비용이 발생 되므로
반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.**



사용 시 주의사항

가. 경고

- 1) 제품 사용 중 신체에 이상이 발생하였을 경우 즉시 사용을 중지하고 의사와 상담하십시오.
- 2) 사용자의 적절한 견인 높이에 맞추어 적정 압력으로 공기를 주입하고, 과도하게 공기를 주입하지 마십시오.
- 3) 목적 이외에는 사용하지 마시고 디스크 환자가 착용할 경우에는 반드시 의사와 상담 후 사용하십시오.
- 4) 장착부에 발진, 붉음 점, 가려움 등의 증상이 나타났을 경우에는 사용을 즉시 중지하여 주십시오.
- 5) 알레르기성 피부 또는 과민반응을 나타내시는 분들은 장시간 사용 시 가려움 등의 증상이 나타날 수 있으니 이 경우에는 사용을 중지하여 주십시오.
- 6) MRI 검사를 받을 사람은 검사 전에 사용을 중지하십시오.
- 7) 임신부나 어린이는 사용하지 마십시오.
- 8) 취침 시에 사용하지 마십시오.
- 9) 식사 직후 사용하지 마십시오.
- 10) 자동차를 운전 중이거나 그와 유사한 상황에서 사용하지 마십시오.
- 11) 성인 미만이 사용할 시 전문의의 지시 및 보호자의 감독 하에 사용하십시오.
- 12) 거동이 불편하거나 치매가 있으신 분은 반드시 보호자의 감독 하에 사용하십시오.
- 13) 복부나 허리부위에 어떠한 상해가 있다면 완전히 치료 후에 사용하십시오.
- 14) 다음의 사람은 반드시 의사의 처방과 지도로 사용하십시오.
 - ① 심장수축장치(페이스메이커) 등의 체내 이식형 의료용 전자기기 등 의료용 전자기기를 사용하고 있는 사람.
 - ② 악성종양이 있는 사람.
 - ③ 심장에 장애가 있는 사람.
 - ④ 출산직후의 사람.
 - ⑤ 고도의 말초 순환장애의 의한 지각장애가 있는 사람.
 - ⑥ 피부에 감염증이 있는 사람.
 - ⑦ 안정을 필요로 하는 사람.
 - ⑧ 체온 38°C이상의 사람.
 - ⑨ 염좌, 근육이 이탈되는 급성(통풍)환자의 사람.
 - ⑩ 고령의 나이에 골다공증이 있는 사람.
- 15) 의사의 처방과 지도로 사용하십시오.



사용 시 주의사항

나. 일반적 주의

- 1) 본 제품은 사용설명서에 나와 있는 용도로만 사용되어야 하고 반드시 사용 전 사용설명서를 숙지하십시오.
- 2) 시계, 자기카드 등의 자기에 영향을 받는 것에는 가까이하지 말아 주십시오.
- 3) 제품에 파손 등이 없는지를, 점검하고 자석의 장착부에 파손 등이 있는 경우에는 사용하지 말아 주십시오.
- 4) 오랫동안 사용하지 않았을 경우에는 표면에 금속 등의 이물질이 흡입 부착되어 있지 않은지 확인하여 주십시오.
- 5) 습기가 없는 건조한 장소에 보관하십시오.

다. 상호작용

- 1) 다른 의료기와 동시에 사용하지 말아주십시오.
- 2) 다른 기기와 병용을 하면 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하십시오.
- 3) 강한 외부의 충격이나 다른 의료기기에 의해 오작동 등 영향을 받을 수 있는 곳에서는 사용에 주의하십시오.

라. 적용상의 주의 : 사용 중에는 다음 사항에 주의하여 주십시오.

- 1) 기기에 고장이 발견되었을 경우에는 사용을 즉시 중지하여 주십시오.
- 2) 용도 외의 사용을 금지합니다.
- 3) 자석 부분에 충격을 주지 마십시오.
- 4) 난방기구의 앞이나 고온이 발생하는 곳에서 사용을 삼가하십시오.
- 5) 눕거나 엎드린 상태에서 사용하지 마십시오.
- 6) 허리 부분에 정확하게 위치하도록 착용한 후 사용하여 주십시오.
- 7) 과도한 공기 주입으로 인해 제품이 파손될 경우 제품파열과 함께 큰 소리가 날 수도 있으므로 반드시 적정 압력을 주입하십시오.
- 8) 무리하게 힘을 가하거나 공기 주입구에 이물질을 넣는 경우 제품이 파손될 수 있습니다.
- 9) 기기에 날카로운 물건이 닿지 않도록 주의하십시오.
- 10) 무거운 물체로 압력을 가하지 마십시오.
- 11) 본 제품은 세탁이 불가합니다. 오염 시 젖은 수건(물티슈)으로 닦아주시기 바랍니다.
- 12) 본 제품은 방수가 되지 않습니다. 사우나, 목욕탕 등에서는 사용하지 마십시오.
- 13) 너무 과도하게 조이지 않도록 하고 착용 중 신체에 무리가 오는 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 14) 기기의 고장 및 취급에는 다음 사항에 주의하여 주십시오.
 - ① 기기는 개조하지 말아 주십시오. 임의대로 개조 시 A/S를 받으실 수 없습니다.
 - ② 기기의 고장은 판매점 또는 제조판매원에 연락하여 주십시오.

품목정보

제품명: 닥터벨트 에어핏

품목명: 의료용 자기발생기 (A85010.01)

모델명: BABK-P200

제조인증 번호: 제인 20-4707호

제조업자 상호: (주)비엠에스

제조업자 주소: 경기도 파주시 법원읍 침울길 72(D동일부), 76-2(C동)

고객센터: 1644-0565

제조번호 / 제조 연월일: 별도 표기

포장단위: 1Box (443g±150g)

보관 환경조건: -10 ~ 40℃ / Up to 75% R.H. / 700~1,060hPa

제조국 : MADE IN KOREA

본 제품은 ‘의료기기’입니다.

심벌의 설명			
	주의(caution)		사용설명서에 따를 것