

닥터벨트 사용설명서

품목명 : 의료용 자기발생기 / (모델명 : BABK-P100)

고객센터 : 1644-0565

이 제품은 ‘의료기기’이며 ‘사용상의 주의사항’과 ‘사용방법’을 잘 읽고 사용하십시오.

제품 특징

사용 목적

의료용자기발생기로서 영구자석의 자계를 이용하여 근육통 완화에 사용하고, 수동식 공기주입식 정형용 견인장치로서 추간판 탈출증, 퇴행성 협착증 등의 치료를 목적으로 공기주입을 통하여 척추를 견인하는 등에 사용하는 수동식 장치

작용 원리

1) 의료용자기발생기

본 장치는 벨트에 영구자석이 부착되어 있어 허리에 벨트를 착용하여 허리근육 통증 부위에 영구자석의 자계를 이용한다.

2) 수동식 공기주입식 정형용 견인장치

본 장치를 허리에 착용한 후 공기 주입 펌프를 통해 공기를 주입하면 에어셀이 팽창하면서 척추를 눌러주어 견인작용을 한다.

제품 구성




구성품



본체
권장사이즈 (허리 24~40인치)




펌프

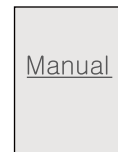

사용 설명서

각 부의 명칭

앞면

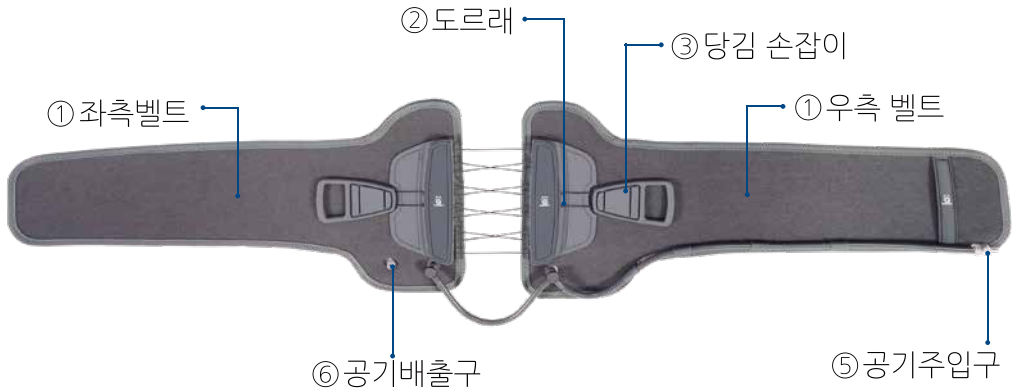

- ① 좌/우측 벨트 : 에어셀과 자석이 허리에 밀착되도록 감싸는 부분
- ② 도르래 : 영구자석과 에어셀을 허리에 밀착시켜주는 기능
- ③ 당김 손잡이 : 도르래를 당겨주는 손잡이


펌프



에어셀에 공기를 주입해 주는 장치

각 부의 명칭

뒷면

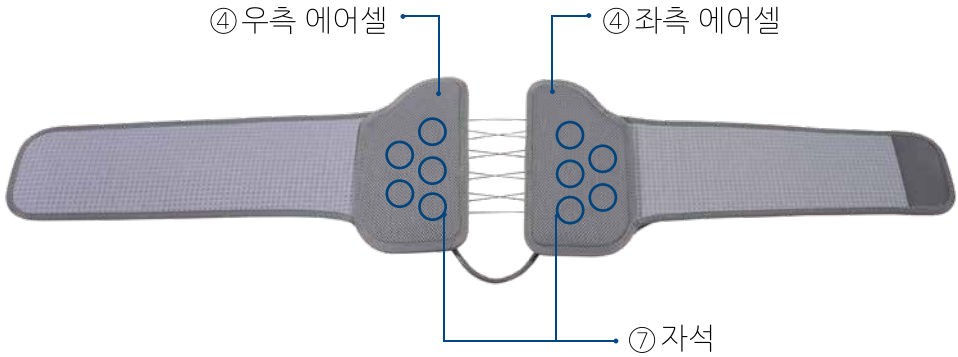

- ④ 좌/우측 에어셀 : 공기압을 이용해 허리를 견인해주는 기능
- ⑤ 공기주입구 : 펌프를 이용하여 에어셀에 공기를 주입해주는 부분
- ⑥ 공기배출구 : 에어셀의 공기를 배출해주는 부분
- ⑦ 자석 : 영구자석의 자계를 이용하는 부분으로 커버 내부에 위치함

사용 방법

사용 전 준비사항

- 1) 사용 전 반드시 사용설명서를 숙지하여 주십시오.
- 2) 제품에 파손 등이 없는지를 점검하고 파손이 있는 경우 사용하지 마십시오.
- 3) 영구자석에 이물질이 묻어 있는지 확인하여 주시고 이물질이 있는 경우 제거 후 사용하여 주십시오.

조작 방법

- 1) 피부에 직접 닿지 않도록 얇은 옷을 입으신 후 사용하십시오.
- 2) 벨트의 도르래 부위가 허리 정중앙에 위치하도록 밀착시켜주십시오.

※U자형 호스가 아래로 향하도록 착용하십시오



사용 방법

3) 벨트를 몸에 밀착되도록 착용한 후 벨크로를 부착하여 고정시켜주십시오.



4) 당김 손잡이를 당겨 몸에 밀착되도록 조절한 후 당김 손잡이를 벨트에 붙여 고정하여 주십시오



사용 방법

5) 공기 주입구에 펌프를 연결한 후 몸에 맞게 공기를 주입하여 주십시오.



6) 공기주입으로 인하여 과도한 압박이 느껴질 경우 즉시 공기배출구 버튼을 눌러 공기 주입량을 조절하여 주십시오.

7) 공기주입이 끝나면 공기 주입구에서 펌프를 분리하여 주십시오.

8) 사용 후 공기를 배출할 때에는 공기배출구 버튼을 꼭 눌러 공기를 배출 하여주십시오



사용 방법

사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 직사광선을 피하여 습기가 없는 건조한 장소에 보관하여 주십시오.
- 2) 기기에 날카로운 물건이 닿지 않도록 주의하십시오.
- 3) 무거운 물체로 압력을 가하지 마십시오.
- 4) 시계, 자기카드 등의 자기에 영향을 받는 것에는 가까이 하지 말아 주십시오.
- 5) 오랫동안 사용하지 않았을 경우에는 표면에 금속 등의 이물질이 흡입 부착되어 있지 않은지 확인하여 주십시오.
- 6) 본 제품은 세탁이 불가합니다. 오염 시 젖은 수건(물티슈)으로 닦아주시기 바랍니다.
- 7) 제품을 임의로 분해 및 개조하지 마시고 제품에 이상이 발견되면 즉시 사용을 멈추고 판매자에게 문의하십시오.

주의 사항



사용 시 주의사항

가. 경고

- 1) 제품 사용 중 신체에 이상이 발생하였을 경우 즉시 사용을 중지하고 의사와 상담하십시오.
- 2) 사용자의 적절한 견인 높이에 맞추어 적정압력으로 공기를 주입하고, 과도하게 공기를 주입하지 마십시오.
- 3) 목적 이외에는 사용하지 마시고 디스크 환자가 착용할 경우에는 반드시 의사와 상담 후 사용하십시오.
- 4) 장착부에 발진, 붉음 점, 가려움 등의 증상이 나타났을 경우에는 사용을 즉시 중지하여 주십시오.
- 5) 알레르기성 피부 또는 과민반응을 나타내시는 분들은 장시간 사용 시 가려움 등의 증상이 나타날 수 있으니 이 경우에는 사용을 중지하여 주십시오.
- 6) MRI 검사를 받을 사람은 검사 전에 사용을 중지하십시오.
- 7) 임산부나 어린이는 사용하지 마십시오.
- 8) 취침 시에 사용하지 마십시오.
- 9) 식사 직후 사용하지 마십시오.
- 10) 자동차를 운전 중이거나 그와 유사한 상황에서 사용하지 마십시오.
- 11) 성인 미만이 사용할 시 전문의의 지시 및 보호자의 감독 하에 사용하십시오.
- 12) 거동이 불편하거나 치매가 있으신 분은 반드시 보호자의 감독 하에 사용하십시오.
- 13) 복부나 허리부위에 어떠한 상해가 있다면 완전히 치료 후에 사용하십시오.

주의 사항



사용 시 주의사항

14) 다음의 사람은 반드시 의사의 처방과 지도로 사용하십시오.

- ① 심장수축장치(페이스메이커)등의 체내 이식형 의료용 전자기기 등 의료용 전기 기기를 사용하고 있는 사람.
- ② 악성종양이 있는 사람.
- ③ 심장에 장애가 있는 사람.
- ④ 출산직후의 사람.
- ⑤ 당뇨병 등에 의하여 고도의 말초순환장애의 의한 지각장애가 있는 사람.
- ⑥ 피부에 감염증이 있는 사람.
- ⑦ 안정을 필요로 하는 사람.
- ⑧ 체온 38℃이상의 사람.
- ⑨ 염좌,근육이 이탈되는 급성(통풍)환자의 사람.
- ⑩ 고령의 나이에 골다공증이 있는 사람.

15) 의사의 처방과 지도로 사용하십시오.

주의 사항



사용 시 주의사항

나. 일반적 주의

- 1) 본 제품은 사용설명서에 나와 있는 용도로만 사용되어야 하고 반드시 사용 전 사용설명서를 숙지하십시오.
- 2) 시계, 자기카드 등의 자기에 영향을 받는 것에는 가까이 하지 말아 주십시오.
- 3) 제품에 파손 등이 없는지를, 점검하고 자석의 장착부에 파손 등이 있는 경우에는 사용하지 말아 주십시오.
- 4) 오랫동안 사용하지 않았을 경우에는 표면에 금속 등의 이물질이 흡입 부착되어 있지 않은지 확인하여 주십시오.
- 5) 습기가 없는 건조한 장소에 보관하십시오.

다. 상호작용

- 1) 다른 의료기와 동시에 사용하지 말아주십시오.
- 2) 다른 기기와 병용을 하면 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하십시오.
- 3) 강한 외부의 충격이나 다른 의료기기에 의해 오작동 등 영향을 받을 수 있는 곳에서 사용에 주의하십시오.

주의 사항



사용 시 주의사항

라. 적용상의 주의 : 사용 중에는 다음 사항에 주의하여 주십시오.

- 1) 기기에 고장이 발견 되었을 경우에는 사용을 즉시 중지하여 주십시오.
- 2) 용도 외의 사용을 금지합니다.
- 3) 자석부분에 충격을 주지 마십시오.
- 4) 난방기구의 앞이나 고온이 발생하는 곳에서 사용을 삼가하십시오.
- 5) 눕거나 엎드린 상태에서 사용하지 마십시오.
- 6) 허리 부분에 정확하게 위치하도록 착용한 후 사용하여 주십시오.
- 7) 과도한 공기 주입으로 인해 제품이 파손될 경우 제품파열과 함께 큰 소리가 날 수도 있으므로 반드시 적정 압력을 주입하십시오.
- 8) 무리하게 힘을 가하거나 공기 주입구에 이물질을 넣는 경우 제품이 파손될 수 있습니다.
- 9) 기기에 날카로운 물건이 닿지 않도록 주의하십시오.
- 10) 무거운 물체로 압력을 가하지 마십시오.
- 11) 본 제품은 세탁이 불가능합니다.오염시 젖은 수건(물티슈)으로 닦아주시기 바랍니다.
- 12) 본 제품은 방수가 되지 않습니다. 사우나,목욕탕 등에서는 사용하지 마십시오.
- 13) 너무 과도하게 조이지 않도록 하고 착용 중 신체에 무리가 오는 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 14) 기기의 고장 및 취급에는 다음 사항에 주의하여 주십시오.
 - ①기기는 개조하지 말아 주십시오. 임의대로 개조 시 A/S를 받으실 수 없습니다.
 - ②기기의 고장은 판매점 또는 제조판매원에 연락하여 주십시오.

품질 보증

품질 보증서

제품명		제조번호	
구입일		구입처	
고객명		연락처	

품질 보증 기준

무상 보증 기간은 최초 구입일로부터 1년간 보장합니다.

구매일자를 증명할 수 없을 경우,
제품 및 포장케이스에 표시된 제조년월로부터 12개월 입니다.

- 1) 품질보증기간 내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자에 대해서는 당사가 무상으로 수리해 드리고, 수리가 불가능한 경우는 제품을 교환하여 드립니다.
- 2) 다음의 경우에는 무상보증기간 내라도 유상으로 수리해 드립니다.
소비자의 부주의로 인하여 파손 되었거나 제품의 용도와 다르게 사용했을 시
소비자의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 피해
당사의 수리기사가 아닌 다른 사람이 임의로 제품을 분해 또는 개조한 경우
신나,벤젠 등 유기용제에 의하여 외관손상 및 변형된 경우
이물질(세제,물,음료등)을 투입하여 고장이 발생한 경우
천재지변에 의한 제품의 고장 또는 결함



**고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 비용이 발생 되므로
반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.**

제품 사양

제품 사양

제품명 : 닥터벨트

품목명 : 의료용 자기발생기 (A85010.01 2등급)

모델명 : BABK-P100

제조인증 번호 : 제인 20 - 4707 호

제조업자 상호 : (주)비엠에스

제조업자 주소 : 경기도 파주시 월롱면 황소바위길 140

고객센터 : 1644-0565

제조번호 / 제조연월일 : 별도 표기

포장단위 : 1Box (470g $\pm$ 150g)

보관 환경조건 : -10 ~ 40℃ / Up to 75% R.H. / 700~1,060hPa

MADE IN KOREA

본 제품은 ‘의료기기’입니다.

심벌의 설명			
	주의(caution)		사용설명서에 따를 것

고객센터 : 1644-0565

